

# KITAZATO 骨盤底サポーター

## 使用説明書

※この度はお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
 本製品をご使用前に必ず添付文書をお読みいただき正しくご使用ください。  
 また必要な時に読めるよう保管ください。

### 仕様・規格

品番	サイズ	素材
SPS BG・M	M H: 87 ~ 95	身生地: 綿 88%・ポリウレタン 12% マチ部: 綿 70%・レーヨン 30% ベルト: 綿 31%・ナイロン 30%・ポリエステル 23%・レーヨン 10%・ポリウレタン 6%
SPS BG・L	L H: 92 ~ 100	
SPS BL・M	M H: 87 ~ 95	身生地: ナイロン 83%・ポリウレタン 17% ベルト: 綿 31%・ナイロン 30%・ポリエステル 23%・レーヨン 10%・ポリウレタン 6%
SPS BL・L	L H: 92 ~ 100	



カラー: ベージュ  
主材: ナイロン




カラー: ブラック  
主材: 綿

- キタザト骨盤底サポーターは下着の上から着用する、ショーツタイプのサポーターです。
- 下垂・脱出する臓器を正常な位置に保持することが可能です。
- 腹部側と背面側のマジックテープで、簡単に調整可能です。

製造販売届出番号: 22B2X10020000017

### 使用上のご注意

- ・本来の用途以外には使用しないでください。
- ・本品を使用中に皮膚などに異常が現れた場合は直ちに使用を中止し、医師または看護師にご相談ください。
- ・お洗濯の際にはネットをご使用ください。
- ・塩素系漂白剤、タンブラーのご使用はお避けください。

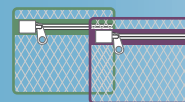


タンブラー乾燥機


### ご使用手順

01 臓器が出ている場合には体内に戻す


02 下着の上から着用する

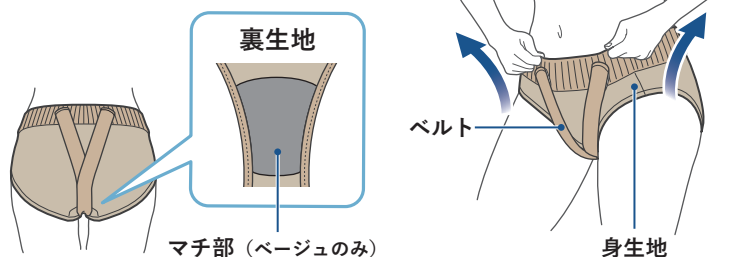


04 履いた後は、股間が圧迫されていることを確認する

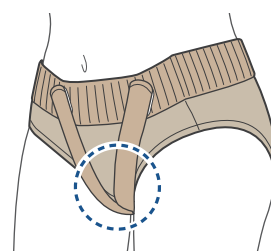

03 お腹側と背中側のマジックテープで調整する

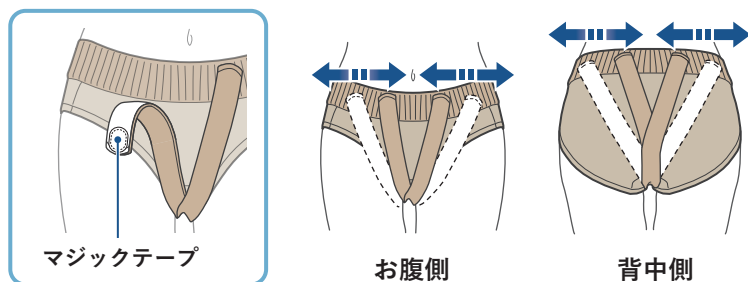

05 最後にベルトが固定されていることを確認する

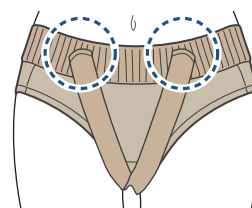

※使用後はお住まいの自治体のルールに従い、廃棄してください。